

L'importanza della manutenzione di manipoli e turbine. Tra tutti, gli strumenti più critici.

Compagni di lavoro di ogni odontoiatra, questi strumenti sono caratterizzati da una elevata complessità che richiede una attenta e costante manutenzione nel tempo.

Una corretta lubrificazione risulta quindi fondamentale per estenderne la vita utile e garantirne le massime prestazioni utilizzo dopo utilizzo.

La corretta procedura di trattamento di uno strumento rotante

PROTOCOLLO MANUALE



Ognuna delle fasi è fondamentale. Il protocollo è unico ma può essere effettuato in diversi modi:

PROTOCOLLO SEMI-AUTOMATICO



Le specifiche tecniche

Dati tecnici	
Tensione di alimentazione	100/240 V - 50/60 Hz
Potenza nominale	30 W
Dimensioni esterne (LxAxP)	340 x 400 x 370 mm
Peso netto	Thalya 12,5 kg
Capacità lubrificante	Bomboletta da 200 a 500 ml
Pressione di esercizio	4–6 bar pressione di flusso
Consumo d'aria (MAX)	40 NI/min
Collegamento aria compressa	6 x 4

Adattatori disponibili*
Adattatore per manipoli micromotore Thalya
Adattatore per turbine cefla
Adattatore per turbine Kavo® attacco MULTiflex®**
Adattatore per turbine Sirona®**
Adattatore per turbine W&H® attacco Roto Quick**
Adattatore per turbine NSK attacco PTL-CL-LED**
Adattatore per turbine Bien-Air® attacco Unifix®**
Adattatore Borden 3 vie**
Adattatore per manipoli micromotore con spray esterno

\* Verificare con il rivenditore l'adattatore adatto per i manipoli di altre marche.

\*\* Si segnala che i marchi identificativi dei prodotti non sono di titolarità di Cefla o di sue società collegate, e sono indicati a mero titolo descrittivo e funzionale alla destinazione d'uso del prodotto accessorio.

Nota: la macchina viene venduta priva di adattatori.



**BU Medical Equipment**  
**Sede legale ed amministrativa**  
**Headquarters**  
Cefla s.c.  
Via Selice Provinciale, 23/a  
40026 Imola - Bo (Italy)  
tel. +39 0542 653111  
fax +39 0542 653344

**Stabilimento**  
**Plant**  
Via Bicocca, 14/c  
40026 Imola - Bo (Italy)  
tel. +39 0542 653441  
fax +39 0542 653601



03/2024 STHATT241S00  
Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico.  
Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.



# Thalya. La manutenzione semplice

Thalya è la nuova alleata per la manutenzione degli strumenti rotanti. Semplice ed intuitiva, permette una perfetta manutenzione, tramite lubrificazione e spurgo, di turbine e manipoli.

Sarà sufficiente collegare l'aria compressa e l'alimentazione elettrica per poter immediatamente utilizzare la macchina.



**Fino a 4 strumenti contemporaneamente**

Thalya ha la possibilità di trattare fino a 4 strumenti contemporaneamente:

- Turbine
- Manipoli micromotore

Sarà sufficiente l'adattatore dedicato per effettuare il trattamento. Thalya è stata concepita per agevolare il lavoro dell'operatore. Gli attacchi possono ruotare di 45° facilitando le operazioni di montaggio e smontaggio degli strumenti.



**Pulizia del mandrino**

Tramite il relativo supporto sarà possibile trattare anche il mandrino rimuovendo ogni residuo di polvere e sporcizia presente nella testa del manipolo.



**Igiene del dispositivo**

L'innovativo design e le caratteristiche della vasca di trattamento ne permettono una completa e perfetta igienizzazione. Estruendo lo sportello frontale ed il cassetto di raccolta liquidi, si potrà procedere alla completa pulizia della macchina.



**Connettività**

Thalya è dotata di Wi-Fi integrato. Connessa alla rete potrà ricevere il servizio di assistenza tecnica da remoto Easy Check.



**Lubrificazione e spurgo di 4 strumenti in meno di un minuto**

Il ciclo di Thalya è composto da tre fasi:

- Spurgo dei condotti
- Lubrificazione
- Spurgo dell'olio in eccesso

Il trattamento di 4 strumenti contemporaneamente, ha una durata totale di circa 55 secondi.




**Alloggiamento universale per olio lubrificante**

Thalya è predisposta per accogliere qualsiasi bomboletta di lubrificante (da 200 a 500 ml). L'operatore sarà libero di scegliere quello più adatto ai propri manipoli. Massima flessibilità per assicurare un risultato ottimale in ogni situazione.



**Pulsantiera semplice ed intuitiva**

La pulsantiera di controllo di Thalya permette un'interazione immediata con la macchina. L'operatore, ha la possibilità di personalizzare la durata delle fasi del ciclo.

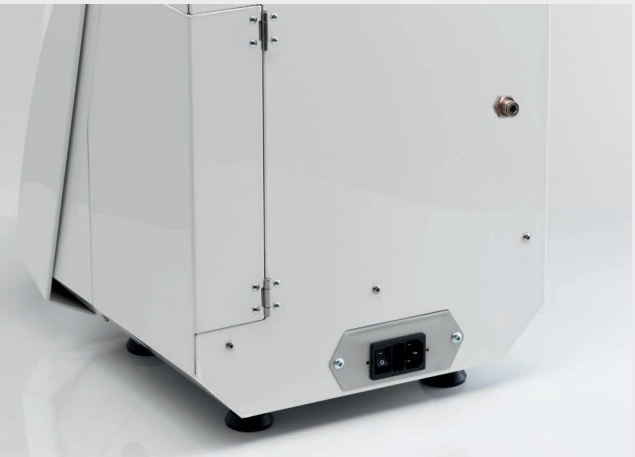

**Plug & Play**

Sarà sufficiente collegare la macchina all'aria compressa, alla corrente elettrica ed inserire la bomboletta di lubrificante per un utilizzo immediato.