

Dati Tecnici	S Classic 17	S Classic 22
Tensione di alimentazione	220/240 V - 50 Hz	
Potenza	2300 W	
Dimensioni esterne LxHxP	480 x 500 x 600 mm	
Dimensioni camera DxP	250 x 350 mm	250 x 450 mm
Peso totale	50 kg	53 kg
Autonomia	Da 9 a 12 cicli	Da 7 a 10 cicli
Carico sterilizzabile*	6 kg	7,5 kg

* Valore massimo riferito a materiale solido non imbustato.

Dotazioni	S Classic 17	S Classic 22
Porta USB	●	●
Porta seriale (RS 232)	●	●
Filtro batteriologico	●	●
Vassoi	2	2
Estrattore vassoi	●	●
Supporto vassoi	●	●
Stampante esterna	○	○

● = di serie ○ = opzionale

Ciclo	Tipo Ciclo	Tempo di sterilizzazione	S Classic 17	S Classic 22
		minuti	Tempo totale di ciclo (minuti)	
134°C SOLIDI IMBUSTATI	S	4	40	42
121°C SOLIDI IMBUSTATI	S	20	55	57
134°C PRIONE	S	18	54	56
134°C SOLIDI NON IMBUSTATI	N	4	32	33
121°C SOLIDI NON IMBUSTATI	N	20	47	48
XXX°C UTENTE	Ciclo personalizzabile dall'utente con temperature 134°C / 121°C, tempi di processo a partire da 4' (134°C) o 20' (121°C) e asciugatura impostabile			
VACUUM TEST			23	23



Una produzione di qualità, garantita da rigorose certificazioni e approvazioni, tra cui:

- ISO 9001/ISO 13485 Sistema qualità applicato ai Dispositivi Medici
- CE 0051 Marcatura del Dispositivo Medico per la Comunità Europea



Una produzione conforme alle normative vigenti:

- Direttiva: Dispositivi Medici 93/42/CEE (e s.m.i.)
- Direttiva: Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva: Bassa Tensione 2006/95/CE
- EN 13060: Piccole sterilizzatrici a vapore
- EN 61010-1: Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici utilizzati in laboratorio
- EN 61010-2-040: Prescrizioni di sicurezza particolari per sterilizzatrici

Mocom S.r.l. si riserva di effettuare modifiche sui prodotti illustrati in foto senza alcuna notifica. 02/2015 MSCUT151500
Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.

S Classic.
Al ritmo della semplicità.



mocom
STERILIZATION FIRST



Sede Legale ed Amministrativa
Headquarters

CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

Stabilimento / Plant

Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601
www.mocom.com
infomocom@mocom.it



S Classic: un accordo perfetto



La sterilizzatrice **S Classic**, disponibile in versione **17 litri e 22 litri**, nasce da un progetto che unisce l'avanguardia tecnologica alla semplicità d'uso. Frutto di una ricerca di materiali che garantiscono maggiore durabilità e di un'attenta progettazione dei componenti, testati a lungo in laboratorio, **S Classic** offre prestazioni di alto livello ad un costo decisamente contenuto.

A motivare il concetto della semplicità è l'obiettivo di facilitare e snellire il lavoro degli operatori e del personale addetto alle procedure di sterilizzazione. A fornire sicurezza ed affidabilità nei risultati è il know-how tecnologico di Mocom, mentre dalla sua esperienza lunga 25 anni, arriva la funzionalità dei programmi. Con tempi e costi ottimizzati, **S Classic** effettua cicli di tipo S e ne consente la registrazione dei dati su memoria interna.



In perfetta sintonia



Grazie al **display LCD** di facile lettura e all'intuitiva tastiera integrata, l'operatore può controllare e pilotare la sterilizzatrice in tutta serenità. L'identificazione univoca degli operatori in relazione al ciclo eseguito avviene mediante **codice PIN**.

Tutti i dati sono registrati nella memoria interna e sono scaricabili su PC, in formato pdf, tramite una normale chiavetta USB.



Le performance, in termini di velocità di esecuzione dei cicli e di adeguatezza del processo, sono assicurate dal **nuovo generatore di vapore**, dalla fase di rimozione dell'aria con vuoto singolo e dall'asciugatura sotto vuoto.

S Classic incorpora il nuovo meccanismo di **chiusura dello sportello**, semplice e sicuro, che garantisce il recupero manuale del carico in caso di black-out.



Monitoraggio costante

Attraverso il display LCD sono fornite regolarmente indicazioni utili riguardanti lo stato della sterilizzatrice. Di conseguenza l'operatore è immediatamente informato non appena sia necessario procedere alle semplici operazioni di **manutenzione programmata**. Soluzione

che garantisce, nel tempo, le performance e l'affidabilità della sterilizzatrice.



Carico e scarico acqua

Completati di **sensori di livello** per monitorare il livello, i serbatoi di carico e scarico sono dotati di **ampi sportelli** così da risultare facilmente accessibili, ispezionabili e igienizzabili.



Attacchi rapidi

Il **sistema ad attacco rapido** per lo scarico dell'acqua sulla parte frontale della sterilizzatrice rende le operazioni semplici e veloci.



Stampante esterna

S Classic può essere dotata di una stampante esterna (opzionale), mediante porta seriale RS232, che permette di **stampare i dati relativi ai cicli eseguiti** su rotolo di carta termica.

